

Ortýza pro zpevnění kolenní česky S6010

- Vynikající fixace a komprese díky upevňovacímu popruhu na suchý zip.
- Zajišťuje dynamickou kompresi a podporu kolenního kloubu.
- Vnitřní vrstva vyrobena z bavlny pro větší komfort.
- Univerzální velikost (jedna velikost padne většině).
- Vhodná pro levé i pravé koleno.

Ortýza Dr. Frei PRO je vhodná jako prevence tendovaginitidy (zánět šlach a jejího pouzdra) a „skokanského kolene“, tlumí vibrace a pomáhá zajistit dodatečnou ochranu a podporu při pracovních a sportovních aktivitách. Kolenní ortýza přesouvá váhu z kolenního kloubu a snižuje podráždění šlach a přetěžování.

Doporučení pro použití: Před použitím se poraďte se svým lékařem. Doporučuje se nosit přímo na tělo nebo spodní prádlo. Individuální léčbu a dobu používání stanoví lékař.


Kontraindikace: Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál.

| Rozměry | Velikosti | Maximální odchylka |
|------------------|----------------------|--------------------|
| | UNIVERZÁLNÍ VELIKOST | |
| Obvod kolene, cm | 30 - 43 | ± 1,0 cm |




Jak správně nasadit ortýzu:

Na levou nohu:

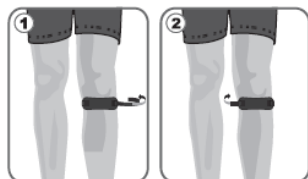

Na pravou nohu:

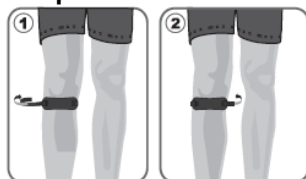

Údržba: Perte s jemnými čisticími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neotírejte ani neždímejte při praní a oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor. Nepoužívejte chemické čištění.

Upozornění: Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortýza vyrobena. Doba používání může být upravena pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních hřejivých mastí.

Složení: aeroprene - 60%, polyester - 25%, bavlna - 15%

Podmínky skladování: Skladujte na suchém místě při teplotě od +5°C do +40°C. Udržujte mimo dosah přímého slunečního svítu.

Datum výroby: Uvedeno na obalu.

Velikost: Univerzální

Distributor: medHaus s.r.o., Kačírkova 986/11, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268,

e-mail: medhaus@medhaus.cz, www.medhaus.cz, www.medpack-group.cz.

Výrobce: Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 356,

e-mail: info@medtex-swiss.ch, medpack-group.com, medtex-swiss.ch, dr-frei.com Dr. Frei is a registered

Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand.