



Stabilizační podpora kolene se 4 spirálami S6058


- „Contour design“ - nastavitelné popruhy na suchý zip pro individuální kompresi, pohodlné nošení a stabilizaci kolene během fyzické aktivity.
- Dvě boční odnímatelné spirály poskytují lepší podporu a stabilitu. Patelární opora pomáhá stabilizovat a chránit česku. Další kruhová výztuha kolem česky poskytuje ochranu a stabilizaci.
- Je vyrobena z prodyšného aeroprenu (zdravotně nezávadný neopren s mikroventilací) a bavlny pro optimální pohodlí.
- Univerzální velikost (jedna velikost padne většině).
- Vhodná pro levé i pravé koleno.

Ortéza Dr. Frei PRO se používá se jako prevence úrazu kolene a česky při účasti na sportovních a pohybových aktivitách. Při chronické nestabilitě česky (rekurentní subluxace) a vazivové laxitě (volnosti) kolenního kloubu. Poskytuje dynamickou podporu a pomáhá rozdělit zátěž na kloub během pohybu.

Doporučení pro použití: Před použitím se poraďte se svým lékařem. Doporučuje se nosit přímo na tělo nebo spodní prádlo. Individuální léčbu a dobu používání stanoví lékař.

Kontraindikace: Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál.


Rozměry	Velikosti	Maximální odchylka
	UNIVERZÁLNÍ VELIKOST	
Obvod kolene, cm	30 - 41	± 1,0 cm

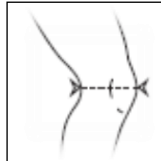

Jak správně nasadit ortézu:

Na pravou nohu:

Na levou nohu:

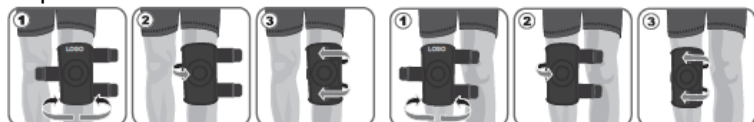

Údržba: Perte s jemnými čistícími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neotírejte ani neždímejte při praní a oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor. Nepoužívejte chemické čištění).

Upozornění: Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortéza vyrobena. Doba používání může být upravena pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních hřejivých mastí.

Složení: aeropren - 60%, polyester - 20%, bavlna - 15%, latex – 5%, kovové spirálové výztuhy.

Podmínky skladování: Skladujte na suchém místě při teplotě od +5°C do +40°C. Udržujte mimo dosah přímého slunečního svitu.

Datum výroby: Uvedeno na obalu.

Velikost: Univerzální

Distributor: medHaus s.r.o., Kačírkova 986/11, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268,

e-mail: medhaus@medhaus.cz, www.medhaus.cz, www.medpack-group.cz

Výrobce: Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 356,

e-mail: info@medtex-swiss.ch, medpack-group.com, medtex-swiss.ch, dr-frei.com Dr. Frei is a registered Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand.