


ODBĚR VZORKU, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Použijte výtěrovou tyčinku pro nosohltan dodávanou v sadě.


1. Odběr nosního sekretu

- (1) Opatrně vložte tyčinku do nozdry pacienta, dosáhněte povrchu zadního nosohltanu, který poskytuje nejvíce sekrece pro vizuální inspekci.
- (2) Otřete povrch zadního nosohltanu. Několikrát tyčinkou zatočte.
- (3) Vyndejte tyčinku z nosní dutiny.

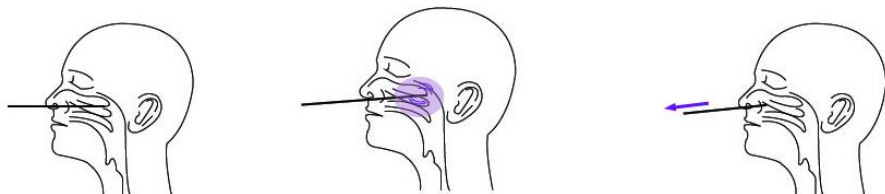

2. Odběr sekretu z hrdla

- (1) Vložte tyčinku přes celá ústa až do hrdla, soustřeďte na červenou část hrdelní stěny a čelistní mandle.
- (2) Mírně otřete o bilaterální krční mandle a hrdelní stěnu.
- (3) Vyhněte se dotyku jazyku a vytáhněte tyčinku.

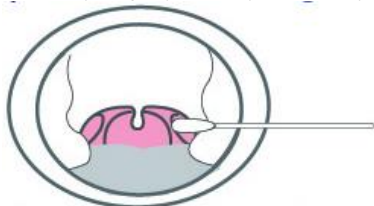


Co nejdříve po odběru by vzorky měly být ošetřeny roztokem pro odběr virů nebo roztokem pro extrakci vzorků dodaným s touto soupravou. Test dokončete do 5 minut.

TESTOVACÍ PROCES


1. Extrakce vzorku

- (1) Přidejte 0,5 ml (asi 10 kapek) z pufru pro extrakci vzorků do zkumavky.
- (2) Vložte tyčinku do zkumavky s obsahem 0,5 ml extrakčního pufru. Zatočte tyčinku alespoň šestkrát, zatímco její hlavu tlačíte na dno a stěnu zkumavky.
- (3) Ponechte tyčinku ve zkumavce po dobu 1 minuty.
- (4) Zmáčkněte zkumavku prsty zvenku, aby se tyčinka ponořila.
- (5) Těsně spojte nástavec pro kapání se zkumavkou.

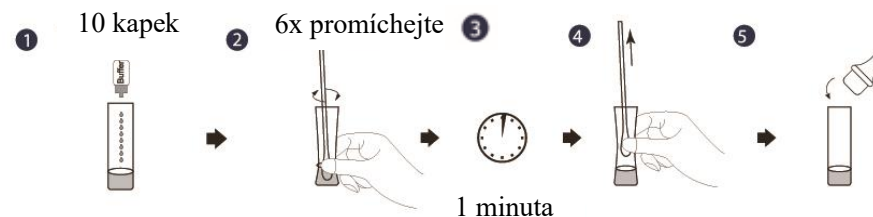

2. Detekce

- (1) Otevřete obal s testovací kazetou. Vložte kazetu na suchou a vodorovnou pracovní plochu.
- (2) Přidejte 2 kapky (asi 60 µl) připraveného extraktu se vzorkem.
- (3) Zkontrolujte výsledky 10 – 15 minut po provedení testu. Výsledky pozorované po 15 minutách nejsou klinicky významné.

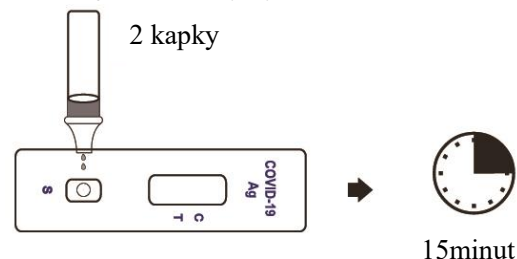


HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Negativní: Zobrazí se pouze jeden červený pruh v kontrolní oblasti (C) a žádný pruh v testovací oblasti (T).

Pozitivní: Zobrazí se dva červené pruhy. Jeden v testovací oblasti (T) a jeden v kontrolní oblasti (C).

Nevalidní: Žádný pruh se nezobrazí v kontrolní oblasti. Toto indikuje nesprávnou operaci nebo poškozenou kazetu. Opakujte test s novou sadou. Pokud problém přetrvává, přestaňte používat tuto šarži a kontaktujte svého dodavatele.

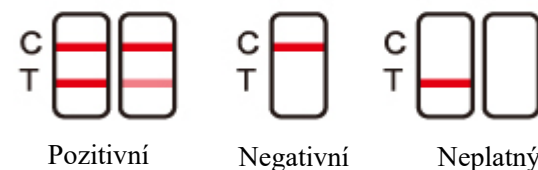

Poznámka: I nevalidní vzorky jsou považovány za infekční odpad. Měl by být odebrán nový vzorek.