

# NÁVOD K POUŽITÍ

KŘESLO KLOZETOVÉ POJÍZDNÉ

# 512 BCS/ADJ



CE

## POUŽITÍ

Klozetové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

## POPIS

Rám křesla je vyroben z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti. Je doplněn plastovou hygienickou deskou, omyvatelným polstrovaným sedákem, polstrovanou opěrkou zad a plastovou toaletní nádobou. Křeslo je dále vybaveno čtyřmi otočnými kolečky, z nichž zadní dvě jsou opatřena nášlapnou brzdou. Boční odklopná madla mají pohodlné polstrované područky. Křeslo je dodáváno ve třech šířkách.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška křesla: 95-105 cm

Šířka křesla: 54,5/60/66 cm

Délka křesla: 62 cm

Výška opěrky zad: 40,5 cm

Výška prkénka: 50-60 cm

Výška sedáku: 54,5-64,5 cm

Šířka sedu: 46/50/56 cm

Hloubka sedu: 46 cm

Nosnost: 130 kg

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

**Křeslo není určeno pro transport osob a jako náhrada transportního vozíku.**

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte křeslo k sezení.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 125 kg.

Při skládání a rozkládání křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li křeslo v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání křesla musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.


Křeslo není určeno pro používání ve vlhkém prostředí (sprcha apod.).

## OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám křesla s kolečky, opěrka zad s područkami, dvě odnímatelné podnožky se stupačkami, plastové hygienické prkénko, plastovou hygienickou nádobu, omyvatelný polstrovaný sedák a 2 aretační šrouby k připevnění opěrky zad.

**SLOŽENÍ KŘESLA**

Vyjměte z krabice rám křesla s kolečky. Zasuňte spodní část opěradla do otvorů v rámu (A) a dotáhněte šrouby (1). Nasadte područky na úchyty na přední části křesla (B) a zacvakněte pojistkami (2, 3). Madla odklopíte/vyndáte uvolněním těchto pojistek. Nasadte podnožky na úchyty umístěné na bocích křesla (C). Podnožky odklopíte uvolněním této pojistky. Pro nastavení výšky stupačky povolte a opět utáhněte šroub (4). Na rám umístěte plastové hygienické prkénko a na něj položte polstrované sedátko. Zezadu vložte do držáku plastovou toaletní nádobu. Pro nastavení výšky sedu zamáčkněte pojistku (5) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku sedu. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.

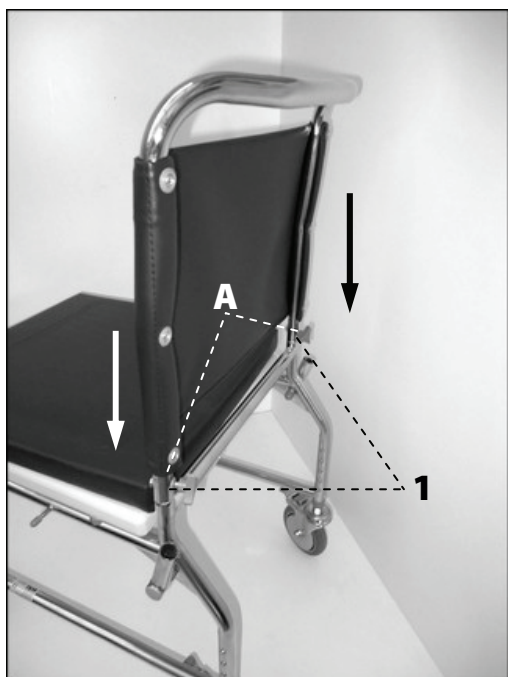


Nasazení opěrky zad

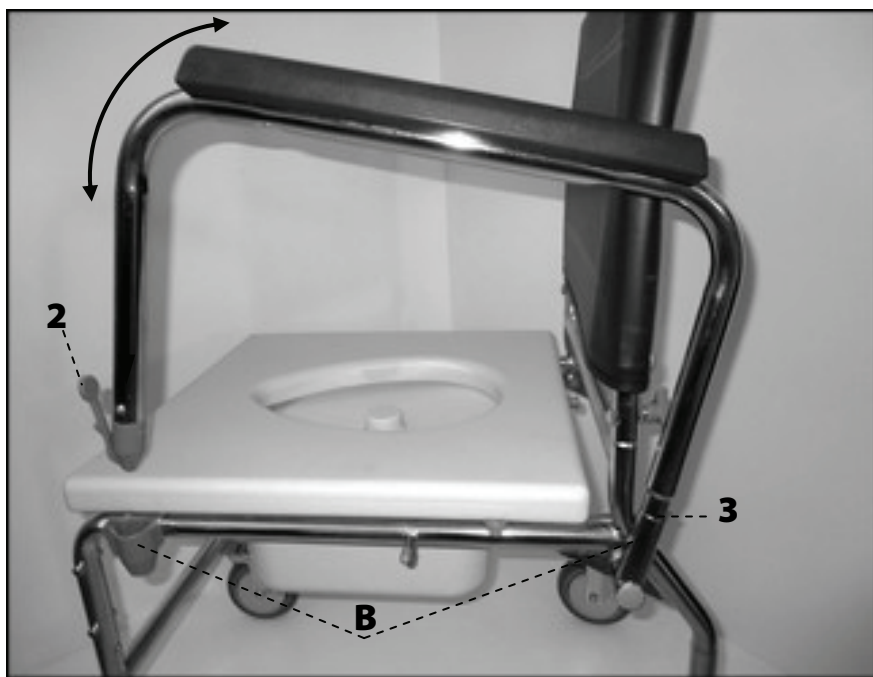


Nasazení područek




Nasazení podnožek

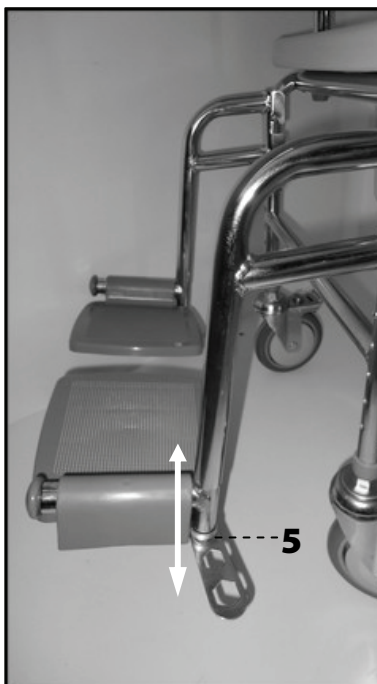

Nastavení výšky stupačky

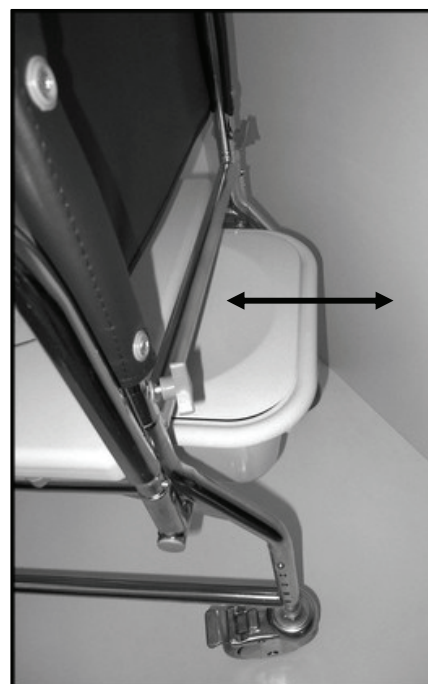

Manipulace s hygienickou nádobou

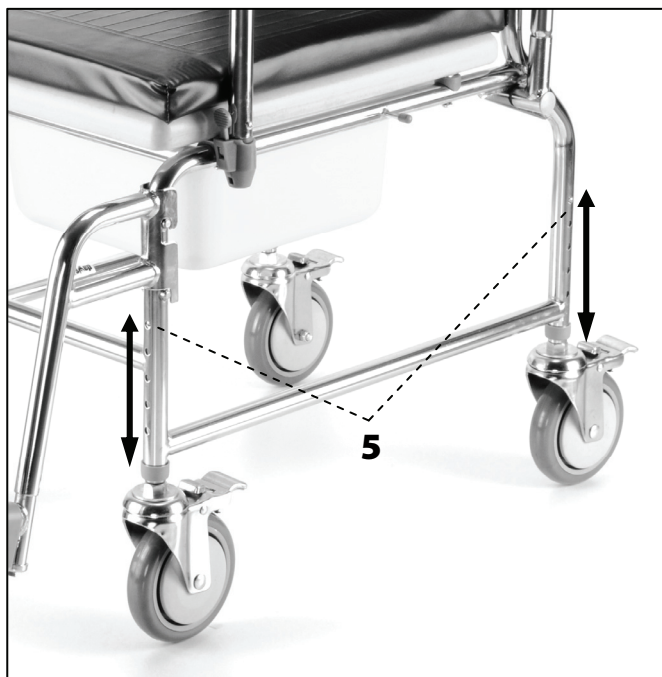

Nastavení výšky sedu

## ÚDRŽBA

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček a brzd, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

## ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

## UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.