

# NÁVOD K POUŽITÍ

MADLO NA VANU

# 566



CE

## POUŽITÍ

Madlo na vanu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen bez pomoci použít vanu. Madla usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech a zvyšuje vlastní soběstačnost.

## POPIS

Madlo je vyrobeno kombinací povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti a je vybaveno rychloupínacím systémem.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška madla: 32 cm

Nastavitelné dle šířky okraje vany: 8-18 cm

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním madla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním madla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při upevňování madla k vaně postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.


Pro větší bezpečnost doporučujeme doplnit madlo protiskluzovou podložkou.

## OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části madla, tj. madlo s rychloupínacím mechanismem.

## INSTALACE MADLA

Vyjměte madlo s krabice a nasadte čelisti (A) na okraj vany a ve zvolené poloze madlo upevněte pomocí rychloupínací aretační páčky (B). Vyklopte páčku do vodorovné polohy, otáčením po směru hodinových ručiček jemně přitáhněte madlo k vaně a páčku přitlačte zpět do původní pozice. Připevňovací čelisti madla jsou opatřeny gumovými koncovkami, které zabraňují poškození vany a zvyšují fixační upevnění madla. Zkontrolujte, zda je madlo pevně ukotveno a nehýbe se ani po zatížení. Pokud tomu tak není je zapotřebí celý postup opakovat. Nyní je madlo připraveno k použití. Pro uvolnění madla postupujte v opačném pořadí.

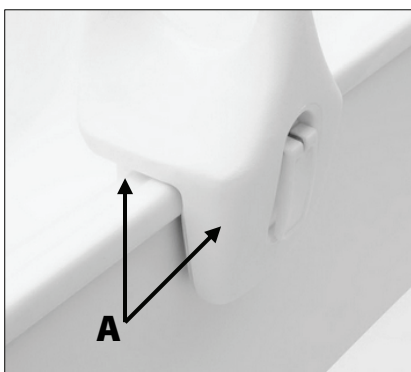

Nasazení madla

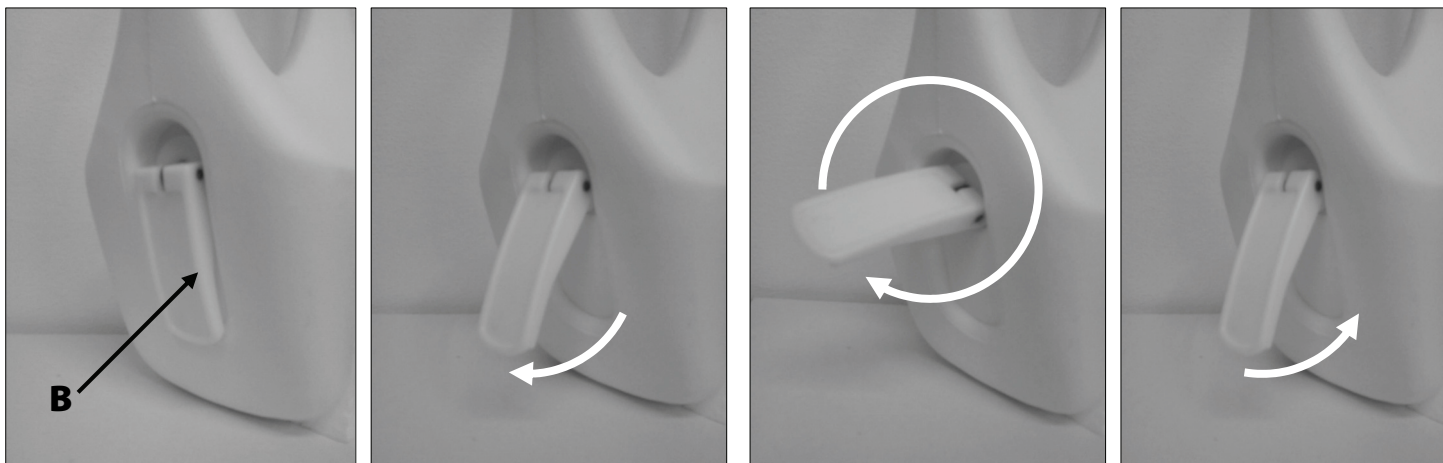

Přípevnění madla aretační páčkou

## ÚDRŽBA

Madlo lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění madlo řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

## ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

## UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.



