

# Technický list

## Páska na ochranu rukou bezlepidlová náplast 7695-50-45

Elastický, samolepicí ochranný obvaz, speciálně vyvinutý pro použití na prstech a koncích prstů. Zabraňuje pronikání vody a nečistot a má nadprůměrnou odolnost proti oděru. Odtrhněte obvaz a jemným tahem jej obtočte kolem oblasti, která má být chráněna.

rozměry: délka 4,50 m, šířka 50 mm  
samolepicí ochranný obvaz  
ideální pro zranění rukou a prstů  
odolný proti vodě a materiálu  
elastický a lze utrhnout



Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



## Pokyny k použití

Po řádné dezinfekci odtrhněte ochranný obvaz Medybee a jemným tahem jej otočte kolem zraněné oblasti. Pro větší poranění by měla být použita sterilní gáza. Při poranění prstů si produkt oviňte kolem prstu tak, aby vyčníval přibližně 2 cm. Ty jsou přeloženy a zbývající obvaz je pak ovinut kolem prstu.

V případě závažných poranění, např. Paže nebo nohy, lze produkt použít jako dodatečnou ochranu nad stávajícími obvazy po počátečním lékařském ošetření. Tato aplikace umožňuje bezproblémovou péči o osobní hygienu (praní / sprchování). Výrobek by měl být obtočen kolem existujícího obvazu alespoň 3krát, překrývající se a pevně napnutý. (Tento ochranný obvaz lze použít několikrát).